

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No utilice esta prueba pasada la fecha de caducidad.
- Asegúrese de que el envase esté cerrado herméticamente y no lo abra hasta que vaya a utilizar la prueba.
- Ciertas afecciones médicas, como un quiste ovárico o un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero), pueden causar un resultado falso o irregular.
- Los procedimientos deben seguirse con precisión para obtener resultados exactos.
- Todos los resultados deben ser confirmados por el profesional de la salud, especialmente a la hora de tomar decisiones sobre futuros cuidados médicos.

Para aumentar sus posibilidades de un embarazo saludable para usted y su bebé, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Mantenga una dieta equilibrada.
- No fume.

El período desde la concepción hasta el tercer mes de embarazo es muy importante. Es necesario que consulte a su médico con regularidad durante todo el embarazo para obtener la atención y orientación nutricional apropiadas.

ADVERTENCIA:

Según la Dirección General de Salud Pública, las mujeres no deben tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo. El consumo de alcohol crea el riesgo de defectos congénitos.

Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones o sus resultados, llame a nuestra línea de ayuda de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este. Llame gratis al 1-800-367-6022, o visítenos en www.FirstResponse.com.

FIRST RESPONSE

PREGNANCY

Fabricado para Church & Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628

FIRST RESPONSE es una marca comercial de Church & Dwight Co., Inc.

www.FirstResponse.com

PRECAUCIÓN:

ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE BOTÓN DE LITIO.

- No desarme el dispositivo y deséchelo de acuerdo con la normativa local.
- Esta batería no es reemplazable, es peligrosa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Esta batería puede causar lesiones graves o mortales en 2 horas o menos si se traga o se coloca dentro de cualquier parte del cuerpo.
- Busque atención médica de inmediato si se sospecha de que la batería se ha tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo. Póngase en contacto con la National Battery Ingestion Hotline (línea nacional de ayuda en caso de ingestión de baterías) (1-800-498-8866), disponible las 24 horas, o con un médico de inmediato.

¿Necesita la versión en español? Escanee aquí



72031512
FRIN-90140-12

FIRST RESPONSE

PREGNANCY



Mire aquí cómo realizar la prueba

Prueba digital para la detección del embarazo

Cuándo usar la prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ La prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ está diseñada para detectar la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH) hasta 6 días antes de la falta del período menstrual (5 días antes del día del período menstrual previsto).

La prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ tiene una precisión de más del 99 % cuando se utiliza desde el día del período menstrual previsto. Puede utilizar la prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ en cualquier momento del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, en general, es la primera orina de la mañana la que contiene el nivel más alto de GCH, la hormona del embarazo, y se recomienda utilizarla si se va a realizar la prueba de forma temprana.

LEA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico in vitro. No debe tomarse internamente. No utilizar después de la fecha de caducidad grabada en la parte inferior de la caja. Dispositivo de un solo uso. No reutilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. No desarme el dispositivo. No coma ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica.

CONSERVACIÓN

Conserve la prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ en un lugar seco a menos de 30 °C (86 °F). No congelar.

ANTES DE EMPEZAR:

ESTE DISPOSITIVO SE AUTOACTIVA AL RETIRARLO DEL ENVOLTORIO. NO ABRA EL ENVOLTORIO HASTA QUE ESTÉ LISTA PARA USARLO. Después de leer el folleto, cuando esté lista para realizar la prueba, retire el envoltorio de papel aluminio de la varilla de prueba y retire la cubierta. (Después de retirar el envoltorio, verifique en la pantalla la presencia de un símbolo de reloj no parpadeante ⌚. El dispositivo está listo para usarse. No utilice la prueba a menos que el símbolo del reloj esté en la pantalla sin parpadear).



INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 1

Prueba en el chorro de orina

- Sostenga el mango de manera que la punta absorbente esté apuntando hacia abajo y la pantalla no apunte hacia su cuerpo.

- Coloque la punta absorbente en el chorro de orina durante 5 segundos. Tenga cuidado de no mojar con orina la funda plástica. Durante la prueba, nunca sostenga el dispositivo con la punta absorbente apuntando hacia arriba.



Prueba en el contenedor

- Para usar el método de inmersión, recoja la orina en un recipiente limpio y seco.

- Sumerja toda la punta absorbente en la orina durante 5 segundos.



PASO 2

INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 2

- Mientras continúa sosteniendo la varilla con la punta absorbente hacia abajo, vuelva a colocar la cubierta y coloque la varilla sobre una superficie plana no absorbente con la pantalla hacia arriba.
- El símbolo del reloj ⌚ comenzará a parpadear unos 30 segundos después de aplicar la orina para indicar que la prueba está funcionando.



La prueba funciona

ESPERE

- Espere 3 MINUTOS COMPLETOS para que se muestre el resultado de la prueba.



LECTURA DE LOS RESULTADOS

- En aproximadamente 3 minutos, aparecerá un inconfundible "YES+" o "NO-" en la pantalla.

EMBARAZADA

Si ve "YES+", la prueba indica embarazo.



NO EMBARAZADA

Si ve "NO-", es probable que no esté embarazada.



72031512
FRIN-90140-12

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: La prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ detecta la gonadotropina coriónica humana (GCH) que el cuerpo produce durante el embarazo. La hormona se encuentra en la orina durante el embarazo.

P: ¿Cuándo puedo realizar la prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™?

R: La prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ está diseñada para detectar la hormona GCH hasta 6 días antes de la falta del período menstrual (5 días antes del día del período menstrual previsto). La cantidad de hormona del embarazo aumenta a medida que el embarazo avanza durante aproximadamente los primeros tres meses. En pruebas de laboratorio con muestras de orina del principio del embarazo, la prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ arrojó los siguientes resultados:

NÚMERO DE DÍAS ANTES DEL PERÍODO MENSTRUAL PREVISTO	% DE MUESTRAS DE MUJERES EMBARAZADAS QUE DAN UN RESULTADO POSITIVO
1	>99%
2	>99%
3	96%
4	86%
5	60%

P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: La prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ tiene una precisión de más del 99 % desde el día del período menstrual previsto en estudios de laboratorio. No obstante, es posible que algunas mujeres embarazadas no tengan cantidades detectables de la hormona del embarazo en la orina el día en que se realizan la prueba o que el primer día de su período menstrual ocurra más tarde de lo esperado.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado en la pantalla es "YES+" (Si+) (embarazada)?

R: Recuerde que esta prueba no está diseñada para reemplazar el diagnóstico de su profesional de la salud. Un resultado de la prueba "YES+" muestra que se detectó la hormona del embarazo (GCH), que en general indica embarazo. Debe consultar al médico para confirmar que está embarazada. Si el resultado es positivo, pero cree que no está embarazada, debe verificarlo con el médico.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado en la pantalla es "NO-" (no embarazada)?

R: Es posible que no esté embarazada o que sea demasiado pronto para saberlo. Si no tiene su período menstrual en el plazo de unos días, deberá repetir la prueba con otra prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™. Es posible que su período menstrual previsto ocurra más tarde de lo esperado o que su orina no haya tenido suficiente hormona del embarazo para registrar un resultado "YES+". Si tras repetir la prueba, obtiene otro resultado "NO-" y su período menstrual aún no ha comenzado, debe llamar al médico.

P: El reloj parpadeante ⌚ ha desaparecido seguido de un "?" en la pantalla. ¿Qué significa?

R: El símbolo "?" indica que se ha producido un error durante la prueba. Debe repetir la prueba con otra prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones.

P: La pantalla está en blanco. ¿Qué sucede?

R: Si la pantalla se pone en blanco en cualquier momento antes de mostrar un resultado, significa que ocurrió un error. Debe repetir la prueba con otra prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones.

P: ¿Por cuánto tiempo se mostrará el resultado en la pantalla?

R: El resultado se mostrará durante al menos 30 minutos. Lea los resultados en este plazo. Después de leer el resultado, deseche la varilla.

Nota: Las varillas de la prueba digital para la detección del embarazo de FIRST RESPONSE™ contienen una batería de botón de litio no extraíble. Asegúrese de desechar la varilla de la prueba digital de acuerdo con la normativa local en cuanto a la eliminación de las baterías de litio.

P: ¿Qué sucederá si la funda plástica se moja?

R: Si se salpica un poco al realizar la prueba, no habrá ningún daño, pero si se moja mucho, la prueba puede dañarse. Si esto sucede, la pantalla se pondrá en blanco o aparecerá el mensaje de error "?".

P: ¿Algunos fármacos o medicamentos afectan la prueba?

R: Solo los medicamentos que contienen la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (GCH), pueden afectar el resultado. La prueba no debería verse afectada por las terapias hormonales que contengan citrato de clomifeno, alcohol, analgésicos, antibióticos o píldoras anticonceptivas.

P: Retiré el envoltorio del dispositivo y el símbolo de reloj apareció en la pantalla; sin embargo, todavía no estoy lista para usar la prueba. ¿Qué debo hacer?

R: Una vez retirado del envoltorio, el dispositivo debe usarse en un plazo de 12 horas. Mantenga el dispositivo seco antes de usarlo.

P: ¿La cantidad de líquido que bebo afectará el resultado?

R: La ingesta excesiva de líquidos, incluida el agua, podría diluir la orina y hacer que la cantidad de GCH presente no se detecte correctamente. No debe beber demasiado líquido antes de la prueba.