

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No utilice esta prueba pasada la fecha de caducidad.
- Asegúrese de que el envase esté cerrado herméticamente y no lo abra hasta que vaya a utilizar la prueba.
- Ciertas afecciones médicas, como un quiste ovárico o un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero), pueden causar un resultado falso o irregular.
- Los procedimientos deben seguirse con precisión para obtener resultados exactos.
- Todos los resultados deben ser confirmados por el profesional de la salud, especialmente a la hora de tomar decisiones sobre futuros cuidados médicos.

Para aumentar sus posibilidades de un embarazo saludable para usted y su bebé, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Mantenga una dieta equilibrada.
- No fume.

Desde la concepción hasta los tres primeros meses de embarazo es el momento más importante. Es necesario que consulte a su profesional de la salud de inmediato para obtener la atención y orientación nutricional apropiadas.

ADVERTENCIA:

Según la Dirección General de Salud Pública, las mujeres no deben tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo. El consumo de alcohol crea el riesgo de defectos congénitos.

Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones o sus resultados, llame a nuestra línea de ayuda de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este. Llame gratis al 1-800-367-6022, o visítenos en www.FirstResponse.com.

FIRST RESPONSE

PREGNANCY

Fabricado para Church & Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628
FIRST RESPONSE es una marca comercial de Church & Dwight Co., Inc.
www.FirstResponse.com

¿Necesita la versión en español? Escanee a continuación



72031504
FRIN-90127-30S

FIRST RESPONSE

PREGNANCY



Mire aquí cómo realizar la prueba

Prueba para la detección del embarazo de resultado temprano

Cuándo usar la prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™

La prueba de embarazo está diseñada para detectar la gonadotropina coriónica humana (GCH). Realice la prueba hasta 6 días antes de la falta del período menstrual (5 días antes del día del período menstrual previsto).

La prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™ tiene una precisión de más del 99 % cuando se utiliza a desde el día del período menstrual previsto. Puede utilizar la prueba de resultado temprano de FIRST RESPONSE™ en cualquier momento del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, en general, es la primera orina de la mañana la que contiene el nivel más alto de GCH, la hormona del embarazo, y se recomienda utilizarla si se va a realizar la prueba de forma temprana.

LEA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico in vitro. No debe tomarse internamente. No utilizar después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad está grabada en la parte inferior de la caja. Dispositivo de un solo uso. No reutilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. No desarme el dispositivo. No coma ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica.

CONSERVACIÓN

Conserve la prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™ en un lugar seco a menos de 30 °C (86 °F). No congelar.

ANTES DE EMPEZAR:

Después de leer el folleto, cuando esté lista para realizar la prueba, retire el envoltorio de papel aluminio de la varilla de prueba. Retire la cubierta y use de inmediato.



INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 1

Prueba en el chorro de orina

- Sostenga la varilla de prueba por el mango de manera que el lado impreso con el visor de resultados no apunte hacia el chorro de orina.

- Coloque la punta absorbente en el chorro de orina durante 5 segundos. Tenga cuidado de no mojar con orina la funda plástica. Durante la prueba, nunca sostenga la varilla de prueba con la punta absorbente



Prueba en el contenedor

- Para usar el método de inmersión, recoja la orina en un recipiente limpio y seco.

- Sumerja toda la punta absorbente en la orina durante 5 segundos.



PASO 2

INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 2

- Después de la prueba, vuelva a colocar la cubierta, manteniendo la punta absorbente húmeda apuntando hacia abajo.

- Coloque la varilla sobre una superficie plana no absorbente con el visor de resultados hacia arriba.

ESPERE

- Espere 3 MINUTOS COMPLETOS para que se muestre el resultado de la prueba.

- Puede ver un color rosado que se mueve a través del visor de resultados.

- Calcule el tiempo de su prueba cuidadosamente. Podrá leer los resultados después de 3 minutos.

LECTURA DE LOS RESULTADOS

- A los 3 minutos, lea sus resultados en el visor de resultados.
- **Importante:** lea su resultado en el plazo de 10 minutos.

EMBARAZADA

DOS LÍNEAS DE COLOR ROSA en el visor de resultados.

Una línea puede ser más clara que la otra.



NO EMBARAZADA

UNA LÍNEA DE COLOR ROSA en el visor de resultados.



SIN LÍNEAS en el visor de resultados.



Vuelva a realizar la prueba con otra varilla de prueba de resultado temprano de FIRST RESPONSE™



72031504
FRIN-90127-30S

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: La prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™ detecta la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH) que el cuerpo produce durante el embarazo. La hormona se encuentra en la orina durante el embarazo.

P: ¿Cuándo puedo hacer la prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™?

R: La prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™ está diseñada para detectar la hormona GCH hasta 6 días antes de la falta del período menstrual (5 días antes del día del período menstrual previsto). La cantidad de hormona del embarazo aumenta a medida que el embarazo avanza durante aproximadamente los primeros tres meses. En pruebas de laboratorio con muestras de orina del principio del embarazo, FIRST RESPONSE™ arrojó los siguientes resultados.

NÚMERO DE DÍAS ANTES DEL PERÍODO MENSTRUAL PREVISTO	% DE MUESTRAS DE MUJERES EMBARAZADAS QUE DAN UN RESULTADO POSITIVO
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	76%

P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: FIRST RESPONSE™ tiene una precisión de más del 99 % desde el día del período menstrual previsto en estudios de laboratorio. No obstante, es posible que algunas mujeres embarazadas no tengan cantidades detectables de la hormona del embarazo en la orina el día en que se realizan la prueba o que el primer día de su período menstrual ocurra más tarde de lo esperado.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado es positivo (embarazada)?

R: Recuerde que esta prueba no está diseñada para reemplazar el diagnóstico de su profesional de la salud. El resultado positivo (embarazada) de la prueba muestra que se detectó la hormona del embarazo (GCH), que en general indica embarazo. Debe consultar al médico para confirmar que está embarazada. Si el resultado es positivo, pero cree que no está embarazada, debe verificarlo con el médico.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado es negativo (no embarazada)?

R: Es posible que no esté embarazada o que sea demasiado pronto para saberlo. Si no tiene su período menstrual en el plazo de unos días, deberá repetir la prueba con otra prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™. Es posible que su período menstrual previsto ocurra más tarde de lo esperado o que su orina no haya tenido suficiente hormona del embarazo para que la prueba arroje un resultado positivo. Si tras repetir la prueba, obtiene otro resultado negativo y su período menstrual aún no ha comenzado, debe llamar al médico.

P: He esperado más de 3 minutos, y todavía no hay líneas en el visor de resultados. ¿Ocurre algo malo?

R: El resultado debe aparecer en el plazo de 3 minutos. Debe haber por lo menos una línea de color rosa en el visor de resultados a los 3 minutos. Una línea de color rosa indica que la prueba está completa y que la ha hecho correctamente. Si no aparecen líneas en el visor de resultados a los 3 minutos, la prueba no es válida. Es posible que no tenga suficiente orina en la punta absorbente. Debe repetir la prueba con otra prueba para la detección del embarazo de resultado temprano de FIRST RESPONSE™. Siga cuidadosamente todas las instrucciones.

P: ¿En cuánto tiempo podré obtener el resultado?

R: El resultado se puede leer en un plazo de 3 a 10 minutos. Después de 10 minutos, se debe ignorar cualquier cambio en el resultado.

P: ¿Algunos fármacos o medicamentos afectan la prueba?

R: Solo los medicamentos que contienen la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (GCH), pueden afectar el resultado. La prueba no debería verse afectada por las terapias hormonales que tengan citrato de clomifeno, alcohol, analgésicos, antibióticos o píldoras anticonceptivas.

P: ¿La cantidad de líquido que bebo afectará el resultado?

R: La ingesta excesiva de líquidos, incluida el agua, podría diluir la orina y hacer que la cantidad de GCH presente no se detecte correctamente. No debe beber demasiado líquido antes de la prueba.