

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No utilice esta prueba pasada la fecha de caducidad.
- Asegúrese de que el envase esté cerrado herméticamente y no lo abra hasta que vaya a utilizar la prueba.
- Ciertas afecciones médicas, como un quiste ovárico o un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero), pueden causar un resultado falso o irregular.
- Los procedimientos deben seguirse con precisión para obtener resultados exactos.
- Todos los resultados deben ser confirmados por el profesional de la salud, especialmente a la hora de tomar decisiones sobre futuros cuidados médicos.

Para aumentar sus posibilidades de un embarazo saludable para usted y su bebé, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Mantenga una dieta equilibrada.
- No fume.

El período desde la concepción hasta el tercer mes de embarazo es muy importante. Es necesario que consulte a su médico con regularidad durante todo el embarazo para obtener la atención y orientación nutricional apropiadas.

ADVERTENCIA:

Según la Dirección General de Salud Pública, las mujeres no deben tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo debido al riesgo de defectos congénitos.

Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones o sus resultados, llame a nuestra línea de ayuda de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este. Llame gratis al 1-800-367-6022, o visítenos en www.FirstResponse.com.



Fabricado para Church & Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628
FIRST RESPONSE es una marca comercial de Church & Dwight Co., Inc.
www.FirstResponse.com

¿Necesita la versión en español?
Escanee a continuación



72031514
FRIN-80005-02



Prueba para la detección del embarazo EasyCup

Cuándo usar la prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™

La prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™ es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de la gonadotropina coriónica humana (GCH) el día de la falta del período menstrual o cualquier día posterior.

Puede utilizar la prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™ en cualquier momento del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, en general, es la primera orina de la mañana la que contiene el nivel más alto de GCH, la hormona del embarazo.



Mire aquí cómo realizar la prueba

LEA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico in vitro. No utilice los componentes de la prueba después de la fecha de caducidad grabada en la parte inferior de la caja. Asegúrese de que la bolsa protectora esté cerrada. Cada bolsa protectora contiene un (1) recipiente en una bolsa protectora sellada con una tira reactiva y un paquete absorbente de humedad. El paquete absorbente ayuda a conservar la tira reactiva mientras se encuentre dentro de la bolsa. Este paquete no debe usarse en relación con la prueba y debe desecharse una vez que se abra la bolsa. No utilice el producto si el precinto de la bolsa protectora está abierto, roto o dañado. Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso externo. Dispositivo de un solo uso. No reutilizar. Mantener fuera de la luz solar. No desarme el recipiente y la tira reactiva. No coma ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica.

CONSERVACIÓN

Conservar la prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™ a temperatura ambiente, entre 4 °C y 30 °C (38 °F y 86 °F).

ANTES DE EMPEZAR:

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y NO ABRA LA BOLSA DE ALUMINIO HASTA QUE ESTÉ LISTA PARA REALIZAR LA PRUEBA.

De lo contrario, el resultado de la prueba puede no ser válido.

- Tenga a mano un reloj o temporizador.



INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 1

- Retire el recipiente de la prueba de la bolsa protectora rasgándola por la muesca. Utilice el producto inmediatamente.
- Abra la tapa del recipiente de la prueba. La tira reactiva ya está dentro del recipiente. No retire la tira reactiva.

PASO 2

- Orine directamente en el recipiente de la prueba. Llene al menos hasta la marca mínima de la etiqueta. No llene demasiado el recipiente con orina.
- Coloque el recipiente de la prueba en una superficie plana. No agite el recipiente.

CONTINUACIÓN →

INSTRUCCIONES (cómo usarla):

ESPERE

- Espere 5 MINUTOS COMPLETOS para que se muestre el resultado de la prueba.
- Las líneas de color rosa comenzarán a aparecer. Si no es así, consulte "Resultado no válido" a continuación. Los resultados de la prueba no deben leerse después de 15 minutos. Los resultados de la prueba no son válidos después de 15 minutos.



LECTURA DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la prueba se pueden ver a través del recipiente. No es necesario retirar la tira reactiva del recipiente para leer el resultado de la prueba.

EMBARAZADA

Si ve dos líneas de color rosa, la prueba indica embarazo. No importa lo tenues u oscuras (o anchas) que sean las líneas. Una línea puede ser más clara que la otra. El aspecto de los resultados puede variar.



NO EMBARAZADA

Si solo ve una línea de color rosa, es probable que no esté embarazada.



RESULTADO NO VÁLIDO

Si después de realizar la prueba (5 minutos), no se ve ninguna línea de color rosa dentro de la ventana de control, este resultado se considera no válido. La prueba no ha funcionado, posiblemente porque se ha utilizado demasiada o muy poca orina. Si no aparece ninguna línea de color rosa, es posible que no se hayan seguido correctamente las instrucciones. Deberá repetir la prueba utilizando una nueva prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™.

DESPUÉS DE LA PRUEBA

Tire por el inodoro la muestra de orina que queda en el recipiente. Deseche todos los componentes en un bote de basura. No reutilice el recipiente ni la prueba.

72031514
FRIN-80005-02

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: La prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™ detecta una cantidad muy pequeña de la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH) que el cuerpo produce durante el embarazo. La hormona se encuentra en la orina durante el embarazo.

P: ¿Cuándo puedo realizar la prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™?

R: La prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™ está diseñada para detectar la GCH el primer día de la falta del período menstrual y cualquier día después. No es necesario usar la primera orina de la mañana, aunque es muy recomendable porque, si está embarazada, la primera orina de la mañana es, en general, la que contiene la mayor concentración de GCH.

P: ¿Cuándo debo leer mis resultados?

R: Después de esperar 5 minutos, los resultados de la prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™ deben leerse lo antes posible. Los resultados de la prueba no deben leerse después de 15 minutos. Los resultados de la prueba no son válidos después de 15 minutos.

P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: Las pruebas de laboratorio y los estudios de consumidores demuestran que la prueba EasyCup de FIRST RESPONSE™ tiene una precisión de más del 99 % en la detección de los niveles hormonales típicos del embarazo desde el día de la falta del período menstrual. Tenga en cuenta que los niveles de la hormona pueden variar. No obstante, es posible que algunas mujeres embarazadas no tengan cantidades detectables de la hormona del embarazo en su orina el primer día de la falta del período menstrual o que su período menstrual ocurra más tarde de lo esperado.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado muestra dos líneas de color rosa (embarazada)?

R: Recuerde que esta prueba no está diseñada para reemplazar el diagnóstico de su profesional de la salud. El resultado positivo (embarazada) de la prueba muestra que se detectó la hormona del embarazo (GCH), que en general indica embarazo. Debe consultar al médico para confirmar que está embarazada. Si el resultado es positivo, pero cree que no está embarazada, debe verificarlo con el médico.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado muestra una línea (no embarazada)?

R: Es posible que no esté embarazada o que sea demasiado pronto para saberlo. Si no tiene su período menstrual en el plazo de unos días, deberá repetir la prueba con otra prueba para la detección del embarazo EasyCup de FIRST RESPONSE™. Es posible que su período menstrual previsto ocurra más tarde de lo esperado o que su orina no haya tenido suficiente hormona del embarazo para que la prueba arroje un resultado positivo. Si tras repetir la prueba, obtiene otro resultado negativo y su período menstrual aún no ha comenzado, debe llamar al médico.

P: ¿Algunos fármacos o medicamentos afectan la prueba?

R: Solo los medicamentos que contienen la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (GCH), pueden afectar el resultado. La prueba no debería verse afectada por las terapias hormonales que contengan citrato de clomifeno, alcohol, analgésicos, antibióticos o píldoras anticonceptivas.

P: ¿La cantidad de líquido que bebo afectará el resultado?

R: La ingesta excesiva de líquidos, incluida el agua, podría diluir la orina y hacer que la cantidad de GCH presente no se detecte correctamente. No debe beber demasiado líquido antes de la prueba.