

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No utilice esta prueba pasada la fecha de caducidad.
- Asegúrese de que el envase esté cerrado herméticamente y no lo abra hasta que vaya a utilizar la prueba.
- Ciertas afecciones médicas, como un quiste ovárico o un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero), pueden causar un resultado falso o irregular.
- Los procedimientos deben seguirse con precisión para obtener resultados exactos.
- Todos los resultados deben ser confirmados por el profesional de la salud, especialmente a la hora de tomar decisiones sobre futuros cuidados médicos.

Para aumentar sus posibilidades de un embarazo saludable para usted y su bebé, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Mantenga una dieta equilibrada.
- No fume.

El período desde la concepción hasta el tercer mes de embarazo es muy importante. Es necesario que consulte a su médico con regularidad durante todo el embarazo para obtener la atención y orientación nutricional apropiadas.

ADVERTENCIA:

Según la Dirección General de Salud Pública, las mujeres no deben tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo debido al riesgo de defectos congénitos.

Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones o sus resultados, llame a nuestra línea de ayuda de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este. Llame gratis al 1-800-367-6022, o visítenos en www.FirstResponse.com.

1 FIRST RESPONSE™ PREGNANCY



Mire aquí cómo realizar la prueba

Prueba para la detección del embarazo de resultado rápido

Cuándo usar la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™

La prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ está diseñada para detectar la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH). Realice la prueba el día de la falta del período menstrual o cualquier día después.

Puede realizar la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ en cualquier momento del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, en general, es la primera orina de la mañana la que contiene el nivel más alto de GCH, la hormona del embarazo.

LEA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico in vitro. No debe tomarse internamente. No utilizar después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad está grabada en la parte inferior de la caja. Dispositivo de un solo uso. No reutilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. No desarme el dispositivo. No coma ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica.

CONSERVACIÓN

Conserve la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ en un lugar seco a menos de 30 °C (86 °F). No congelar.

ANTES DE EMPEZAR:

Tenga a mano un reloj o temporizador. Después de leer el folleto y cuando esté lista para realizar la prueba, retire el envoltorio de papel aluminio de la varilla de prueba y retire la cubierta.



1 FIRST RESPONSE™ PREGNANCY

Fabricado para Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628
FIRST RESPONSE es una marca comercial de Church & Dwight Co., Inc.
www.FirstResponse.com

¿Necesita la versión en español?
Escanee a continuación



72031511
FRIN-90126-09

INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 1

Prueba en el chorro de orina


- Sostenga la varilla de prueba por el mango de manera que la punta absorbente esté apuntando hacia abajo y el visor de resultados no apunte hacia su cuerpo.

- Coloque la punta absorbente directamente en el chorro de orina durante solo 5 segundos.



Prueba en el contenedor

- Recoja la orina en un recipiente limpio y seco, y sumerja toda la punta absorbente en la orina durante solo 20 segundos.

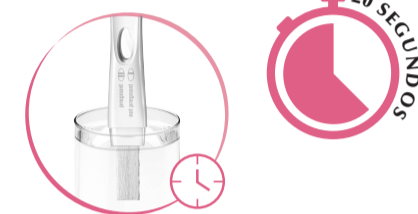

PASO 2

INSTRUCCIONES (cómo usarla):

PASO 2

- Mientras continúa sosteniendo la varilla con la punta absorbente hacia abajo, vuelva a colocar la cubierta y coloque la varilla sobre una superficie plana no absorbente con el visor de resultados hacia arriba.

- Pronto puede ver un color rosado que se mueve a través del visor de resultados, lo que indica que la prueba está funcionando.

ESPERE

- Espere 1 MINUTO COMPLETO para que se muestre el resultado de la prueba.
- Puede ver un color rosado que se mueve a través del visor de resultados.
- Mida cuidadosamente el tiempo de su prueba. Podrá leer los resultados después de 1 minuto.



LECTURA DE LOS RESULTADOS

EMBARAZADA
DOS LÍNEAS DE COLOR ROSA en el visor de resultados.
Una línea puede ser más clara que la otra.



NO EMBARAZADA
UNA LÍNEA DE COLOR ROSA en el visor de resultados.



RESULTADO NO VÁLIDO
Vuelva a realizar la prueba con otra varilla de prueba de resultado rápido de FIRST RESPONSE™



DESPUÉS DE LA PRUEBA

Deseche todos los componentes en un bote de basura. No reutilice la prueba.

72031511
FRIN-90126-09

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: La prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ detecta la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH) que el cuerpo produce durante el embarazo. La hormona se encuentra en la orina durante el embarazo.

P: ¿Cuándo puedo realizar la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™?

R: Puede usar la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ en cualquier momento del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, en general, es la primera orina de la mañana la que contiene el nivel más alto de la hormona del embarazo. Puede usar la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ el día de la falta del período menstrual o cualquier día a partir de entonces.

P: ¿Cuándo debo leer mis resultados?

R: Después de esperar 1 minuto, los resultados de la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ deben leerse lo antes posible. El resultado positivo durará al menos 48 horas. El resultado negativo de la prueba no debe leerse después de 10 minutos.

P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: En estudios sobre la prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™ en muestras de orina representativas de mujeres embarazadas y no embarazadas, los técnicos de laboratorio obtuvieron el resultado esperado correcto en más del 99 %* de las muestras.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado muestra dos líneas de color rosa (embarazada)?

R: Recuerde que esta prueba no está diseñada para reemplazar el diagnóstico de su profesional de la salud. Un resultado de dos líneas de color rosa muestra que se detectó la hormona del embarazo (GCH), que en general indica embarazo. Consulte a su médico para confirmar que está embarazada. Si el resultado es positivo, pero cree que no está embarazada, debe verificarlo con el médico.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado muestra una línea (no embarazada)?

R: Es posible que no esté embarazada o que sea demasiado pronto para saberlo. Si no tiene su período menstrual en el plazo de 7 días, deberá repetir la prueba con otra prueba para la detección del embarazo de resultado rápido de FIRST RESPONSE™. Es posible que su período menstrual previsto ocurra más tarde de lo esperado o que su orina no haya tenido suficiente hormona del embarazo para que la prueba arroje un resultado positivo. Si tras repetir la prueba, obtiene otro resultado negativo y su período menstrual aún no ha comenzado, debe llamar al médico.

P: He esperado más de 1 minuto, y todavía no hay líneas en el visor de resultados. ¿Ocurre algo malo?

R: El resultado debe aparecer en el plazo de 1 minuto el día de la falta del período menstrual. Debe haber al menos una línea de color rosa en el visor de resultados después de 5 minutos para indicar que la prueba está completa y que la ha hecho correctamente. De lo contrario, la prueba no es válida. Esto podría deberse a una cantidad insuficiente de orina en la punta absorbente o a que el dispositivo no se sostuvo con la punta absorbente apuntando hacia abajo mientras se volvía a colocar la cubierta. Debe repetir la prueba con una nueva prueba de resultado rápido de FIRST RESPONSE™, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones.

P: ¿Algunos fármacos o medicamentos afectan la prueba?

R: Solo los medicamentos que contienen la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (GCH), pueden afectar el resultado. La prueba no debería verse afectada por las terapias hormonales que contengan citrato de clomifeno, alcohol, analgésicos, antibióticos o píldoras anticonceptivas.

P: ¿La cantidad de líquido que bebo afectará el resultado?

R: La ingesta excesiva de líquidos, incluida el agua, podría diluir la orina y hacer que la cantidad de GCH presente no se detecte correctamente. No debe beber demasiado líquido antes de la prueba.

* 99% accurate at detecting the pregnancy hormone. However, some pregnant women may not have detectable amounts of pregnancy hormone in their urine on the first day of the missed period or may have miscalculated the first day of their period.